

Käyttöohje

Lue käyttöohje huolellisesti ennen testin suorittamista.

Apteq raskaustesti on nopea ja yksinkertainen testi, jonka voit helposti tehdä itse. Heti raskauden alkuvaiheessa virtsaan alkaa erittyä ihmisen koriongonadotropiini (human Chorionic Gonadotropin, hCG) nimistä hormonia. Apteq raskaustesti havaitsee virtsasta tämän hormonin. Käyttötarkoitus on vain *in vitro* – itse tehtävä testaus. Vain ulkoiseen käyttöön.

Miten testi toimii

Hedelmöitymisen jälkeen istukka alkaa tuottaa ihmisen koriongonadotropiini (hCG) nimistä hormonia, joka erittyy virtsaan. Tässä raskaustestissä on vasta-aineita jotka tunnistavat erityisesti tämän hormonin. Kun virtsasuihku osuu testilaitteeseen, kapillaari-ilmio kuljettaa virtsan eteenpäin testin kalvoa pitkin testialueelle. Jos virtsassa on hCG :tä, muodostuu testialueelle värillinen viiva. Jos testialueelle ei muodostu värillistä viivaa, testin tulos on negatiivinen. Kontrollialueelle muodostuva värillinen viiva vahvistaa, että testi on suoritettu onnistuneesti.

Pakkauksen sisältö

- Alumiinipussi, joka sisältää raskaustestin ja kosteudenpoistajan. Kosteudenpoistaja on ainoastaan säilytystä varten, eikä sitä tarvita testin tekemiseen.
- Käyttöohje.

Mitä muuta tarvitset

- Kello tai ajastin.
- *) Puhdas, kuiva muovi- tai lasiastia virtsanäytteen keräämistä varten

*) *Testi suoritetaan pitämällä testitikku virtsasuihussa. Vaihtoehtoisesti voit kerätä virtsanäytteen puhtaaseen astiaan ja kastaa testin näytteenottopään astiaan kerättyyn virtsanäytteeseen.*

Huomioitavaa

- Tämä testi on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Ei saa niellä.
- Testi hävitetään käytön jälkeen kotitalousjätteiden mukana. Käytä kutakin testiä vain kerran.
- Älä käytä testiä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Älä käytä testiä, jonka alumiinipussi on vaurioitunut.
- Ei lasten ulottuville.

Säilytys


- Säilytetään +4 – +30 °C suljetussa alumiinipussissa viimeiseen käyttöpäivämäärään asti.
- Suojataa suoralta auringonvalolta, kosteudelta ja kuumuudelta.
- Ei saa jäätyä.
- Avaa alumiinipussi vasta sitten kun olet valmis tekemään testin.

Testaus ajankohta

Apteq raskaustesti pystyy havaitsemaan raskauden jopa ensimmäisenä päivänä kuukautisten poisjäännistä. Apteq raskaustesti on niin herkkä, että se voidaan tehdä kaikkina vuorokaudenaikoina, mutta aamuvirtsasta on ihanteellinen suuren hCG pitoisuuden vuoksi.


Miten testi suoritetaan

- Käytä testiä normaalissa huoneenlämmössä (+15- +30°C)
- Avaa suljettu pakkaus juuri ennen käyttöönottoa repäisemällä alumiinipussi auki loven kohdalta. Ota testi esiin.
- Pidä testiä kiinni yhdellä kädellä sen pyöristetystä päästä. Poista toisella kädellä vihreä suojuus näytteenottopäästä.
- Suuntaa näytteenottopää alaspäin ja pidä nuolen osoittama ja rei'itetty kohta virtsasuihussa vähintään kymmenen sekuntia, niin että se kastuu kokonaan. **Älä virtsaa nuolimerkkin yli.**
- *) *Vaihtoehtoisesti voit ottaa virtsanäytteen puhtaaseen astiaan ja kastaa puolet näytteenottopään rei'itetystä kohdasta virtsaan vähintään 15 sekunniksi.*
- Liitä suojuus takaisin näytteenottopäähän. Aseta testi tasaiselle, kuivalle ja puhtaalle pinnalle tulosikkuna ylöspäin. Odota valmistumista.
- Testitulos luetaan 5 minuutin kuluttua.

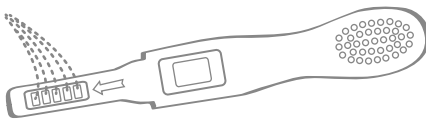

- Testi hävitetään kotitalousjätteiden mukana.

Miten tulokset tulkitaan

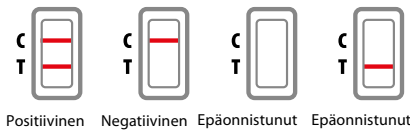

C = Kontrollialue, T = Testialue

Negatiivinen, Ei raskaana

Kontrollialueelle (C) muodostuu vain yksi värillinen viiva. Testialueelle (T) ei muodostu näkyvää viivaa. Tämä tarkoittaa sitä, että raskautta ei ole havaittu.

Positiivinen, Raskaana

Kontrolli (C)- ja testialueille (T) muodostuu värilliset viivat. Tämä tarkoittaa, että olet raskaana. Testiviivan (T) värin kirkkaus voi vaihdella, koska raskauden eri vaiheissa virtsan hCG -pitoisuus vaihtelee.

Huomautus: Jos testiviiva on erittäin heikko, suosittelemme uuden testin tekemistä 48 tunnin kuluessa.

Epäonnistunut, Ei tulosta

Värillistä viivaa ei näy lainkaan, tai viiva näkyy ainoastaan testialueelle (T), mutta ei kontrollialueella (C). Tee testi uudestaan käyttämällä uutta testiä. Jos testi epäonnistuu jälleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Merkitse muistiin tuotteen eränumero (Lot.).

Mitä teen tuloksen jälkeen

Testitulos on positiivinen (kaksi viivaa)

Ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri vahvistaa raskauden arvioituaan kliiniset havainnot ja laboratoriotulokset. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että testin tulos on väärä positiivinen. Lääkäri antaa myös lisätietoja ja neuvoja raskaudesta. Katso myös kohta "Rajoitukset".

Testitulos on negatiivinen (yksi viiva)

Jos sinulla on syytä uskoa olevasi raskaana (esimerkiksi kuukautiset jäävät tulematta), voit tehdä uuden testin muutaman päivän kuluttua. Jos testi on edelleen negatiivinen ja kuukautiset eivät ala muutaman päivän sisällä, ota yhteyttä lääkäriin. Katso myös kohta "Rajoitukset".

Rajoitukset

- Kuten minkä tahansa diagnoosin, myös lopullisen raskausdiagnoosin voi tehdä ainoastaan lääkäri kliinisten ja laboratoriotulosten perusteella.
- Jos virtsanäyte on liian laimea (esimerkiksi vähäisen tiheyden vuoksi), se ei ehkä sisällä testiä varten riittävän korkeaa hCG -pitoisuutta. Jos sinulla on silti syytä uskoa olevasi raskaana, suosittelemme uuden testin tekemistä 48 tunnin kuluttua.
- Raskauden alkuvaiheessa alhainen hCG -pitoisuus voi aiheuttaa negatiivisen tuloksen. Tässä tapauksessa suosittelemme uuden testin tekemistä aikaisintaan 48 tunnin kuluttua.
- Korkea hCG -pitoisuus voi johtua myös joistakin muista syistä kuin raskaudesta (esim. hCG hormonia sisältävät lääkkeet). hCG virtsatestiä ei tule käyttää raskauden testaamiseen, jos näitä syitä ei ole voitu sulkea pois.
- Normaalialue raskautta ja kohdunulkoista raskautta ei voida erottaa toisistaan pelkän hCG pitoisuuden perusteella. Myös spontaani keskenmeno voi aiheuttaa väärän testituloksen.
- hCG hormoniin perustuvat hedelmällisyshoidot voivat aiheuttaa väärän testituloksen. Kysy neuvoa lääkäriltäsi.

Odotettavissa olevat tulokset

Negatiivinen tulos on odotettavissa terveillä ei-raskaana olevilla naisilla. Vaikka hCG -pitoisuus vaihtelee raskauden alkuvaiheessa, Apteq raskaustesti pystyy havaitsemaan raskauden jo ensimmäisenä päivänä kuukautisten poisjäännistä.

Kysymyksiä ja vastauksia

- Kahden eri raskaustestin kontrolliviivoissa on suuri ero. Onko tämä normaalia?** On. Kontrolliviivojen värisävyyden erot eivät vaikuta testitulokseen.
- Voidaanko tuloksia tulkita yli viiden minuutin odotusajan jälkeen?** Ei. Testitulos on luettava viiden minuutin kuluttua. Positiivisen tuloksen tulisi säilyä muuttumattomana usean päivän ajan. Sen sijaan negatiivinen tulos voi muuttua virheellisesti positiiviseksi jo muutamia minutteja viiden minuutin testausajan jälkeen. Väärinkäsitysten välttämiseksi, kannattaa tulos lukea viiden minuutin kuluttua ja sen jälkeen hävittää testi kotitalousjätteiden mukana.
- Testausaikana tulosikkunan taustaväri muuttui vaaleanpunaiseksi ja siihen ilmestyi pystysuuntainen juova. Onko tämä normaalia?** On. Virtsanäytteiden kemiallisessa koostumuksessa ja testausympäristön ilmankosteudessa on eroja. Nämä vaihtelut saattavat aiheuttaa taustavärin muuttumisen vaaleanpunaiseksi tai pystysuuntaisen juovan, mutta nämä tekijät eivät vaikuta testitulokseen. Testi toimii oikein, kun kontrolliviiva ilmestyy testiin viidessä minuutissa.

Versio 8/2014

Tuote nro: SF-W1-M

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s.,
Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4, Czech Republic

Markkinoija: Fennogate Finland, PL 1199, Mikrokatu 1, 70211 Kuopio
Sähköposti: asiakaspalvelu@fennogate.fi