

Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen noga före användning.

Apteq-graviditetstestet är ett snabbt och enkelt självtestet. Redan i början av en graviditet börjar hormonet koriongonadotropin (human Chorionic Gonadotropin, hCG) utsöndras i urinen. Apteq-graviditetstestet upptäcker detta hormon i urinen. Testet är endast avsett för *in vitro*-diagnostik, hemmabruk och för externt bruk.

Hur testet fungerar

Efter befruktningen börjar moderkakan utsöndra hormonet hCG i urinen. I detta test finns antikroppar som identifierar just detta hormon. När urinstrålen kommer i kontakt med teststickan för kapillärkraften urinen vidare längs testets hinna fram till testområdet. Om urinen innehåller hCG, visas ett färgat streck i testfönstret. Om inget streck visas i testområdet, är testresultatet negativt. Det färgade strecket som visas i kontrollfönstret bekräftar att testet har genomförts korrekt.

Förpackningens innehåll

- Aluminiumpåse som innehåller graviditetstest och fuktavlägsnare. Fuktavlägsnaren är endast till för förvaring och behövs inte för att utföra testet.
- Bruksanvisning.

Annat som du behöver

- Klocka eller timer.
- *) Ett rent och torrt plast- eller glaskärl för insamling av urinprov.

*) Du kan utföra testet genom att hålla teststickan i urinstrålen eller också kan du samla urinen i ett rent kärl och doppa teststickans provtagningsände i urinprovet.

Obs!

- Detta test är endast avsett för externt bruk. Får ej sväljas.
- Efter användning kan testet kastas i hushållssoporna. Använd varje test endast en gång.
- Använd inte testet efter förpackningens förfallodatum.
- Använd inte ett test vars aluminiumpåse är skadad.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaring

- Förvara testet i tillsluten aluminiumpåse i +4 – +30 °C fram till förfallodatumet.
- Skydda mot direkt solljus, fukt och värme.
- Får ej frysa.
- Öppna aluminiumpåsen först när du är redo att göra testet.

När kan man testa

Apteq-graviditetstestet kan upptäcka en eventuell graviditet redan första dagen med utebliven menstruation. Apteq-graviditetstestet är så känsligt att det kan utföras alla tider på dygnet, men morgonurinen är bäst då hCG-halten är som högst på morgonen.


Så här gör du testet

- Använd testet i normal rumstemperatur (+15- +30°C)
- Öppna förpackningen precis innan testet ska användas genom att riva upp folieomslaget vid skåran. Ta fram testet.
- Håll testet med en hand i den rundade änden. Ta med andra handen bort det gröna skyddet från provtagningsändan.
- Rikta uppsugningsdelen neråt och håll den så att urinstrålen träffar området med pil och hål. Håll kvar testet i minst tio sekunder, så att den blir helt genomfuktad. **Kissa inte på området ovanför pilmarkeringen.**
*) Alternativt kan du ta ett urinprov i ett rent kärl och doppa halva uppsugningsdelen med hål, i urinen i minst 15 sekunder.
- Sätt tillbaka skyddet på uppsugningsdelen. Placera testet på ett jämnt, torrt och rent underlag med resultatfönstret uppåt. Vänta sedan på resultatet.
- Avläs testresultatet om 5 minuter.



- Kasta testet sedan i hushållssoporna.

Så här läser du av resultatet

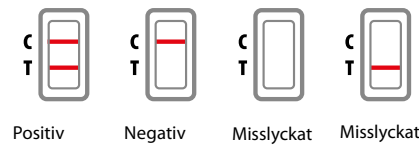

C = Kontrollområde, T = Testområde

Negativ, Inte gravid

I kontrollfönstret (C) visas endast ett färgat streck. I testfönstret (T) visas inget streck. Detta betyder att ingen graviditet har upptäckts.

Positiv, Gravid

I kontroll (C)- och testfönstret (T) visas färgade streck. Detta betyder att du är gravid. Teststreckets (T) intensitet kan variera eftersom hCG-halten i urinen varierar under graviditetens olika skeden. **Obs:** Om teststrecket är mycket svagt, rekommenderar vi att du gör ett nytt test inom 48 timmar.

Misslyckat test, ogiltigt resultat

På testet syns inget färgat streck, eller så syns ett streck endast i testfönstret (T) men inte i kontrollfönstret (C). Testa på nytt med ett nytt test. Om testet misslyckas på nytt, kontakta återförsäljaren. Anteckna produktens partinummer (Lot.).

Så här gör du efter testning

Testresultatet är positivt (två streck)

Kontakta din läkare. Läkaren bekräftar graviditeten efter att ha utvärderat de kliniska upptäckterna och laboratorieresultaten. I vissa fall är det möjligt att ett positivt testresultat är felaktigt. Din läkare ger dig ytterligare information och råd om graviditeten. Se även avsnittet "Begränsningar"

Testresultatet är negativt (ett streck)

Om du har anledning att tro att du är gravid (t.ex. på grund av utebliven menstruation), kan du göra ett nytt test inom några dagar. Om testet fortfarande visar ett negativt resultat och menstruationen inte kommer igång inom ett par dagar, kontakta din läkare. Se även avsnittet "Begränsningar".

Begränsningar

- Precis som vid vilken annan diagnos, kan den slutliga graviditetsdiagnosen endast göras av en läkare genom kliniska prover och laboratorieprover.
- Om urinprovet är för svagt (t.ex. på grund av för svag täthet), kan hCG-halten i urinen vara för låg för testet. Om du ändå har anledning att tro att du är gravid, rekommenderar vi att du gör ett nytt test om 48 timmar.
- I början av graviditeten kan en låg hCG-halt orsaka ett negativt testresultat. I detta fall rekommenderar vi att du gör ett nytt test efter minst 48 timmar.
- En hög hCG-halt kan också bero på andra orsaker än graviditet (t.ex. på läkemedel som innehåller hCG-hormon). Använd inte ett hCG-urinprov som graviditetstest, om dessa orsaker inte kan uteslutas.
- En normal graviditet och ett utomkvedshavandeskap kan inte särskiljas från varandra enbart genom hCG-halt. Även ett spontant missfall kan orsaka ett felaktigt testresultat.
- Fertilitetsbehandling som baseras på hCG-hormonet kan orsaka felaktigt testresultat. Fråga din läkare om råd.

Förväntade resultat

Förväntat resultat hos friska, icke-gravida kvinnor är negativt. Fastän hCG-halten varierar under graviditetens början, kan Apteq-graviditetstestet upptäcka en graviditet redan första dagen med utebliven menstruation.

Frågor och svar

- **Det är stor skillnad mellan kontrollstrecken i två olika graviditetstest. Är detta normalt?** Ja. Skillnader i kontrollstreckens färgnyanser påverkar inte testresultatet.
- **Kan resultaten tolkas senare än efter väntetiden på fem minuter? Nej.** Testresultatet måste avläsas efter fem minuter. Ett positivt resultat kan förbli oförändrat i flera dagar. Ett negativt resultat däremot kan felaktigt ändras till ett positivt redan efter några minuter efter den fem minuter långa testtiden. För att undvika missuppfattningar ska du helst avläsa resultatet efter fem minuter och därefter kasta testet i hushållssoporna.
- **Under testtiden färgades resultatfönstrets bakgrundsfärg rosa och en vertikal linje uppstod. Är detta normalt? Ja.** Det förekommer skillnader i den kemiska sammansättningen i urinprov och i testmiljöns luftfuktighet. Dessa variationer kan orsaka att bakgrunden färgas rosa eller att en vertikal linje uppkommer, men dessa faktorer påverkar inte testresultatet. Testet fungerar korrekt när kontrollstreckets visas i kontrollfönstret efter fem minuter.