

Febertermometer med slagfodral — Bruksanvisning

Läs noggrant före användning

Den kvicksilverfria febertermometern Apteq är avsedd för mätning av maximal kroppstemperatur och är utrustad med analogisk skärm. Termometern innehåller inget kvicksilver, utan det har ersatts med en flytande metall som består av gallium, indium, tenn och zink. Dessa ämnen är fullständigt giftfria och minimerar därmed riskerna för människor och omgivning.

Febertermometern är tillverkad och kontrollerad enligt Europeiska rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och de europeiska standarderna EN 12470-1:2000+A1:2009 Medicinska termometrar - Del 1: Termometrar av glas med flytande metall med maximumfunktion

Tekniska uppgifter


Mätområde	35,5 °C – 42,0 °C
Urskiljbarhet	0,1 °C
Noggrannhet	+0,1 °C / -0,15 °C
Förvaringstemperatur	-15 °C - +42 °C
Mättid Minst	4 minuter

Bruksanvisning

1. Rengör alltid termometern omsorgsfullt före och efter bruk (se rengöringsanvisningarna).
 2. Placera termometern i skyddsfodralet och skruva till locket omsorgsfullt.
Fatta tag i lockets greppytor och slå mätaren fram och tillbaka tills pelaren sjunker under skalans nedre streck (mellan 35 °C och 36 °C).
 3. Välj mätmetod (mun, armhåla eller ändtarm) och följ anvisningarna för respektive mätmetod. För undvikande av fel, kom ihåg att mäta minst 4 minuter.
 4. Uppmätt temperatur avläses på temperaturskalan bakom kapillärröret med mätvätska. Avläsningen kan underlättas av att termometern vänds en aning från sida till sida.
-

Mätning i munnen

Placera termometers spets i "värmefickan" under tungan vid tungroten på vänster eller höger sida och håll munnen stängd i cirka 4 minuter. Tala inte under mätningen och bit inte i termometern. Normaltemperatur med denna metod är 37,0 °C

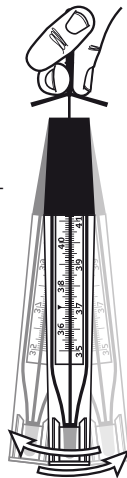

Mätning i armhålan

Torka armhålan omsorgsfullt och placera termometerns spets i armhålan och pressa armen tätt mot kroppen. Mätningen är klar om cirka 4 minuter. Normaltemperatur med denna metod är 36,5 °C

Mätning i ändtarmen

Rengör termometern omsorgsfullt med ett mildt desinfektionsmedel. För in termometerns spets cirka 1 cm i ändtarmen. För att underlätta detta kan något glidmedel, t.ex. en hudkräm eller babyolja appliceras på termometerns spets. Mätningen är klar om cirka 4 minuter. Normaltemperatur med denna metod är 37,6 °C

Rengöring och desinfektion

Febertermometern har ett lufttätt glashölje som tillåter samtliga vanliga desinfektionsmetoder. Under desinfektionen får temperaturen inte överstiga 42 °C, och desinfektionen får inte orsaka mekanisk överkan som skadar glaset. Febertermometern rengörs genom torkning med torr duk och spetsen steriliseras med etylalkohol, eller alternativt genom att skölja termometern i kallt tvålsvatten före och efter bruk.

Om febertermometerens glas går sönder, torka upp den vätska som läckt ur termometern med en duk fuktad i tvålsvatten, med en tygbit eller med pensel. Eftersom vätskan är giftfri kan den trasiga termometern slängas i normalt hushållsavfall.

Obs



- Fäll inte termometern. Den är inte slagtålig.
- Böj eller bit inte i termometern, utsätt den inte för onödigt belastning.
- Sterilisera inte termometern genom kokning.
- Förvara inte termometern i direkt solsken eller i hög temperatur.
- Vänta minst en halv timme efter födointag, rökning, dusch eller bad innan temperaturmätning.

Garanti

För denna febertermometer gäller obegränsad garanti vid normal användning. Garantin omfattar tillverkningsfel som uppstår vid normalt bruk. Garantin omfattar inte fel som uppstår då termometern hanteras fel.