



OtoDry®

Uimarin korva

Neuvoja uimarin korvan välttämiseksi

- Älä kaiva korvaa vanupuikolla tai pyyhkeellä
- Vältä liiallista saippuan tai shampoon käyttämistä korvassa
- Käytä uudessa korvatulppia tai uimalakkia
- Kuivaa veteen kosketuksissa ollut korva huolellisesti
- Varmista, ettei sinulla ole vahatulppaa, koska se voi vaikuttaa korvakäytävätulehduksen syntymiseen
- Konsultoi lääkäriä tai audionomia avun saamiseksi, jos uimarin korva aiheuttaa toistuvia ongelmia

Skannaa tästä!



Jos haluat lisätietoja, skannaa QR-koodi tai käy sivustolla
www.apteq.fi/otodry

asiakaspalvelu@fennogate.fi | www.apteq.fi

Fennogate Finland Oy | Microkatu 1 | 70210 Kuopio

POISTAA TEHOKKAASTI VETTÄ
ESTÄÄ BAKTEERIEN KASVUN
EHKÄISEE KORVAKÄYTÄVÄN TULEHDUSTA



Tietoa uimarin korvasta

Korvakäytävän tulehdus (eksterni otiitti) on yleinen tila, joka aiheutuu usein toistuvasta vesialtistuksesta kuten uimisesta. Toistuvaa korvakäytävän tulehdusta kutsutaan ”uimarin korvaksi”.

Lämmin ja kostea ilma on osasy uimarin korvaan: noin puolet kaikista tapauksista esiintyy kesällä. Korvakäytävän tulehdusta voi esiintyä kaiken ikäisillä, mutta useimmiten lapsilla ja iäkkäillä. Korvan ja korvakäytävän luonnollinen hapan ympäristö ja korvavahan normaali tuotanto antavat yleensä luonnollisen suojan.

Tavallisia uimarin korvan oireita

Jos vettä pääsee korvakäytävään, suojaavan korvavahan tuotanto voi häiriintyä, mikä voi johtaa bakteerien ja sienten kasvuun. Keho vastaa torjumalla bakteereja, jolloin syntyy tulehdus. Tavallisia oireita ovat turvotus ja punoitus sekä joissakin tapauksissa myös kutina, vuoto ja arkuus.

Tavallisia syitä uimarin korvalle

Ulkoisia syitä:

- Vettä korvassa uinnin, kylvyn tai suihkun yhteydessä
- Kostea ja lämmin ilma
- Korvien kaivaminen tai puhdistaminen vanupuikolla
- Saippuaa, shampoota tai hiussuihketta korvassa
- Korvatulppien, kuulokojeen tai kuulokkeiden käyttö

Yksilöllisiä ja lääketieteellisiä syitä:

- Normaalaa ahtaammat, karvaiset tai käyrät korvakäytävät
- Aikaisempia korvakäytävätulehduksia
- Diabetes
- Muut ihosairaudet, kuten esim. psoriaasi tai ihottuma

Miksi OtoDry?

OtoDry-korvasuihke poistaa vettä korvakäytävästä. Sitä käytetään kylvyn, uimisen tai suihkun jälkeen lievittämään epämiellyttävää tunnetta korvan tukkoisuudesta ja kuulon alentumisesta.

Kun vesi poistetaan korvasta, korvaan jää epätodennäköisemmin haitallista kosteutta, joka voi aiheuttaa bakteerien kasvua. Haitallinen, liika kosteus voi johtaa korvakäytävän ihottumaan tai tulehdukseen (joka tunnetaan myös nimellä eksterni otiitti tai uimarin korva).

OtoDry-korvasuihkeen ainutlaatuinen koostumus sisältää boorihappoa, glyserolia ja etanolia, ja sillä on kolmitehoinen vaikutus:

- Kuivattaa korvassa olevan veden
- Estää bakteerien kasvun
- Ehkäisee eksterniä otiittia (nk. korvakäytävän tulehdus)

OtoDry-korvasuihke on pumppupullossa ja sitä on helppo käyttää.

Näin OtoDry toimii

OtoDry sisältää kolme erilaista vaikuttavaa ainesosaa, **boorihappo (3 %)**, etanoli (70 %) sekä glyseroli (3 %), jotka kaikki edistävät eri tavoin OtoDryn vaikutusta uimarin korvan ehkäisemiseksi.

Boorihappo (3 %) säilyttää korvan fysiologisen pH-arvon ja luo korvaan happaman ympäristön, joka ehkäisee bakteerien kasvua ja eksterniä otiittia. **Etanoli (70 %)** kuivattaa ja poistaa vettä korvasta. **Glyseroliilla (3 %)** on osmoottinen vaikutus, minkä ansiosta se poistaa vettä turvonneista kudoksista. Lisäksi se voitelee korvakäytävää.

Sisältää 30 ml korvasuihketta. Aikuisille ja yli 9-vuotiaille lapsille. 1 suihkaus korvaan tarvittaessa. Enintään kaksi kertaa päivässä. Käytä vain korviin. Raskaana oleville ja imettävälle EI suositella tuotteen käyttöä.

Lue pakkausselosteesta täydelliset käyttöohjeet. CE-merkitty lääkinällinen laite.