

Dr.Yglo

Syylien poistohappo

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen Dr. Yglo Syylien poistohapon käyttöä, vaikka olisitkin käyttänyt tuotetta aiemmin. Tietoja on saatettu muuttaa uusien tutkimusten ja löydösten seurauksena sen jälkeen, kun olet viimeksi käyttänyt tuotetta. Säilytä nämä käyttöohjeet siltä varalta, että sinun on luettava niitä uudelleen. Aikuisille ja yli 4-vuotiaille lapsille.

MIHIN DR. YGLO SYYLIEN POISTOHAPPOA KÄYTETÄÄN?

Dr. Yglo Syylien poistohappo on tavallisten syylien hoitoon käytettävä lääkinällinen laite. Dr. Yglo Syylien poistohappo sisältää monokloorietikkahappoa, jolla on keratolyttinen vaikutus ihoon. Syyliä hajooa kerros kerrokselta. Monokloorietikkahappo varmistaa, että syyliä sisältävät solut tuhoutuvat.

Dr. Yglo Syylien poistohapon etu on, että sen levittäminen suoraan syyliälle ei satu, joten hoito soveltuu myös lapsille, kun aikuinen levittää tuotteen oikein.

Dr. Yglo Syylien poistohappoa voidaan käyttää ainoastaan syylien hoitoon:

- Niitä esiintyy pääasiassa käsissä ja jaloissa.
- Ne ovat samanvärisiä ihon kanssa.
- Niiden ympäröimä on alle millimetristä yli senttimetriin.
- Syyliä voi samanaikaisesti esiintyä useampi.
- Tartunta tapahtuu yleensä suoran kosketuksen kautta, mutta myös pyyhkeiden tai pintakosketuksen välityksellä.
- Raapiminen ja kynsien pureskelu kasvattavat tartuntariskiä.



Älä käytä Dr. Yglo Syylien poistohappoa rasvaluomien hoitoon:

- Rasvaluomet voivat olla erikokoisia ja -värisiä.
- Keskimääräinen ympäröimä on 0,5–1 cm.
- Ovat alkuvaiheessa usein ihonvärisiä, kellanruskeita tai harmaanruskeita läiskä. Myöhemmin ne kasvavat isommiksi ja paksummiksi.
- Näyttävät siltä, kuin ne olisivat ihon pinnalla ja niitä olisi helppo raaputtaa irti, mutta todellisuudessa ne ovat kiinnittyneet tiukasti ihoon.
- Niitä voi esiintyä missä tahansa kehon osassa kämmenten ja jalkapohjien ihoa sekä huulia lukuun ottamatta. Ilmestyvät todennäköisimmin rintakehään, selkään, kasvoihin ja kaulalle.



Käyttöohjeet (kemiallisten palovammojen estämiseksi):

- Vain aikuiset saavat levittää tuotetta.
- Käytä vain käsiin ja jalkoihin! Älä käytä muihin kehonosiin.
- Syyliä ympäröivälle terveelle iholle voidaan levittää vaseliinia tai rasvaista voidetta suojaamaan ihoa hoidon aikana.
- Aseta pullo vakaalle pinnalle, joka kestää syövyttävää nestettä.
- Kosketa syyliä applikaattorilla vain kerran levityksen aikana.
- Annostele Dr. Yglo Syylien poistohappoa syyliään vain kerran viikossa.
- Anna nesteen koskettaa vain syyliä.
- Vältä kosketusta ihoon.
- Anna nesteen kuivua kunnolla levittämisen jälkeen.
- Älä peitä syyliä käsittelyn jälkeen esim. laastarilla.
- Tulokset näkyvät viikon kuluttua.
- Pidettävä lasten ulottumattomissa.



ÄLÄ TEE NÄIN:

- Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta.
- Tuotetta ei saa käyttää muualla kuin käsissä ja jaloissa esiintyviin syyliin.
- Tuotetta ei saa levittää kokonaan tai osittain kynnen alla olevaan syyliin.
- Neste ei saa koskettaa tervettä ihoa.
- Tuotetta ei saa levittää, jos kädet tärisevät tai sormet ovat jäykät.
- Syyliä ei saa koskettaa applikaattorilla yhtä kertaa enemmän.
- Syyliä ei saa peittää nesteen levittämisen jälkeen.
- Tuotetta ei saa levittää syntymämerkeille, ontelosyyliin, avoimiin haavoihin, hyperpigmentoituneille alueille, rasvaluomiin tai tummiin, karvaisiin tai erikoisen näköisiin syyliin.
- Tuotetta ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.
- Hoitoa ei saa toistaa odottamatta viikkoa edellisestä hoitokerrasta.



⚠ HUOMAUTUKSET

Älä käytä Dr. Yglo Syylien poistohappoa:

- Alle 4-vuotiaille.
- Jos olet yliherkkä yhdelle tai useammalle ainesosalalle.
- Kasvoille (nestettä ei saa missään tapauksessa päästää silmiin tai nenän tai suun limakalvoille).
- Sukupuolielinten syyliin tai sukupuolielinten alueelle.
- Syntymämerkkeihin, molluskoihin, avohaavoihin, luomiin, pigmenttiluomille, (ruskeisiin) rasvasyyliin sekä tummiin, karvaisiin tai epätavallisilta näyttäviin syyliin.
- Punaisiin, ärtyneisiin tai tulehtuneisiin syyliin.
- Heti syylien kirurgisen poiston, syylien jäädyttämisen (kryoterapia) tai laserhoidon jälkeen. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa iho on punoitettava tai kivulias hoidon jälkeen. Tässä tapauksessa sinun on odotettava vähintään 4 viikkoa, kunnes ihon punoitus tai tulehdus on kadonnut täysin. Dr. Yglo Syylien poistohapon käyttö on sallittua uudelleen vasta sitten.

- Raskauden tai imetyksen aikana.
- Kynnen alle kokonaan tai osittain muodostuneisiin syyliin.
- Levitä valmistetta syyliälle enintään kerran ja toista hoito vain tarvittaessa viikon välein.
- Vältä kosketusta silmien kanssa. Kosketus silmien kanssa voi aiheuttaa sokeutumista.
- Älä hiero tai kosketa silmiä käsillä, jos käsiin on levitetty tuotetta. Jos tuotetta joutuu silmiin, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät Dr. Yglo Syylien poistohappoa:
- Jos diagnoosista on epävarmuutta (ihomuutosta ei voida selvästi selittää syyliksi).
- Immuunipuutostilanteessa (esim. jos käytät sytostaattisia lääkkeitä).
- Diabeteksen tai muiden vaivojen, kuten verisuonisairauksien, tapauksessa, sillä haavat paranevat tällöin hitaammin. Näissä tapauksissa et saa käyttää Dr. Yglo Syylien poistohappoa ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

⚠ VAROITUKSET

- Tuote on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön.
- Käytettävä varovaisesti. Dr. Yglo Syylien poistohapon neste on syövyttävää.
- Jos neste koskettaa tervettä ihoa, huuhtelee alue vedellä. Jos iho näistä varotoimenpiteistä huolimatta ärsyyntyy, sitä on hoidettava samalla tavalla kuin palovammaa.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet eivät lieydy.
- Sulje korkki kunnolla käytön jälkeen ja säilytä pulloa pystyasennossa.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Aikuisen on valvottava tuotetta käyttäviä lapsia, vanhuksia ja kykenemättömpiä käyttäjiä.
- Vältä kosketusta vaatteiden, tekstiilien, pöytäliinojen ja ihon kanssa.
- Lopeta käyttö, jos hoitokohtaan ilmestyy rakkula.
- Kosketa syyliä applikaattorilla vain kerran. Toista tarvittaessa viikon kuluttua.

SIVUVAIKUTUKSET

Dr. Yglo Syylien poistohappo voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, vaikka kaikki eivät koe näitä sivuvaikutuksia. Dr. Yglo Syylien poistohapon sivuvaikutuksia ovat mahdollisesti muun muassa ihoärsytys, polttava tunne, ihon punoitus tai yliherkkyysoireet. Jos jokin näistä haittavaikutuksista muuttuu vakavaksi tai jos huomaat haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

YHTEISVAIKUTUKSET LÄÄKKEIDEN KANSSA

Ei tiedossa olevia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa

SISÄLTÖ – DR. YGLO SYYLIIEN POISTOHAPPO

Pullo, jossa on 2 ml monokloorietikkahapon (50 %) ja tislattun veden seosta. Erityinen applikaattori, jota käytetään nesteen levittämiseen syylälle.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä Dr. Yglo Syylien poistohappoa huoneenlämmössä (15–25 °C), kuivassa ja pimeässä paikassa alkuperäispakkauksessa sekä lasten ulottumattomissa.

Viimeinen käyttöpäivä on ilmoitettu ulkopakkauksen alaosassa. Säilyy avattuna viimeiseen käyttöpäivään saakka.

Lisätietoja Dr. Yglo Syylien poistohaposta löytyy osoitteesta www.dryglo.com. Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä maahantuojaan asiakaspalvelu@fennogate.fi.

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat onnettomuudet on ilmoitettava viipymättä valmistajalle sekä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuu.

SYMBOLIEN SELITYKSET

Pakkauksessa ja käyttöohjeissa käytetyt varoitusmerkit ja symbolit ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa, että tuotetta käytetään turvallisesti ja oikein, ja että käyttäjää ja muita voidaan suojella vahingoittumiselta. Symbolit on selitetty alla olevassa taulukossa:

Symboli	Selitys
	Valmistajan symboli
	Symboli, joka kehottaa lukemaan käyttöohjeet
	Jakelijan symboli
	Symboli, joka osoittaa, että laitteen käyttö edellyttää varovaisuutta
	Viimeisen käyttöpäivämäärän symboli
	Symboli, joka osoittaa laitteen olevan lääkinällinen laite
	Varoitus: syövyttävää ainetta
	Ei alle 4-vuotiaille lapsille
	Symboli, joka osoittaa, että tämä tuote on pidettävä lasten ulottumattomissa
	Symboli, joka osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana
	Eränumeron symboli
	Symboli, joka osoittaa, että tuotetta tulee säilyttää 15–25 °C:n lämpötilassa
	Symboli, joka ilmaisee laitteen yksilöllisen tunnisteen

Dr. Yglo Syylien poistohapon käyttöohjeet

(Vain aikuiset saavat annostella tuotetta):

Levitä tuotetta erittäin varovaisesti.

Liuos on syövyttävää. Ole erityisen varovainen, kun levität tuotetta vaikeasti saavutettaviin käsiin ja jalkojen osiin. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joiden liikkuminen on rajoittunutta tai joiden hienomotoriikka on heikentynyt (tärisevät kädet, jäykät sormet).



1. Dr. Yglo Syylien poistohappo -pullossa on lapsiturvallinen korkki, joka avataan seuraavasti: Aseta pullo vakaalle pinnalle, joka kestää syövyttävää nestettä. Vältä kosketusta vaatteiden, tekstiilien tai pöytäliinojen kanssa. Voit avata pullon painamalla korkkia alas ja kääntämällä samanaikaisesti vastapäivään.

2. Syyllä ympäröivälle terveelle iholle voidaan levittää vaseliinia tai rasvaista voidetta suojaamaan ihoa hoidon aikana.

3. Irrota korkki pullosta.


4. Levitä pieni määrä Dr. Yglo Syylien poistohappoa syyllän päälle applikaattorilla (älä anna nesteen valua terveelle iholle). Varmista, että levität Dr. Yglo Syylien poistohappoa vain syyllälle ja että kosketat syyllää applikaattorilla vain kerran.

5. Anna nesteen kuivua hetki. Älä peitä sitä esim. laastarilla. Sulje pullo huolellisesti käytön jälkeen. Dr. Yglo Syylien poistohappoa ei saa käyttää useammin kuin kerran viikossa.

Nesteelle on annettava viikko aikaa hajottaa syyllän ulkokerros, joten tulos ei ole heti nähtävissä nesteen levittämisen jälkeen. Syyllän koosta ja paksuudesta riippuen Dr. Yglo Syylien poistohappoa on ehkä levitettävä uudelleen viikon kuluttua ensimmäisestä hoitokerrasta. Älä toista hoitoa aiemmin.



Käytä ainoastaan käsien ja jalkojen tavallisiin syyliin

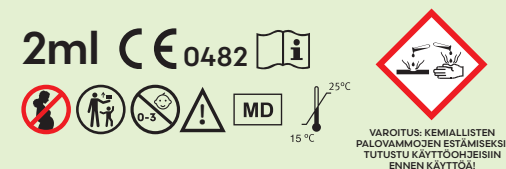

TheOTCLab
Fred. Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam,
The Netherlands

Fennogate Finland Oy.
Microkatu 1, 70210 Kuopio
www.fennogate.fi

Dr.Yglo

Vårtborttagningssyra

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder Dr. Yglo Vårtborttagningssyra, även om du har använt produkten tidigare. Informationen kan ha ändrats enligt ny forskning och rön under tiden sedan du öppnade ditt senaste paket. Spara dessa bruksanvisningar om du behöver läsa dem igen. För vuxna och barn (från 4 år).

VAD ÄR DR. YGLO VÅRTBORTTAGNINGSSYRA?

Dr. Yglo Vårtborttagningssyra är en medicinteknisk produkt för behandling av vanliga vårtor. Dr. Yglo Vårtborttagningssyra innehåller monoklorättiksyra, ett ämne som har en keratolytisk effekt på huden. Vårtan kommer att lösas upp, lager för lager. Monoklorättiksyra ser till att cellerna som innehåller vårtviruset förstörs. Fördelen med att använda Dr. Yglo Vårtborttagningssyra är att en applicering direkt på vårtan inte gör ont, vilket innebär att den också kan användas på barn, om den appliceras korrekt av en vuxen.

Dr. Yglo VÅRTBORTTAGNINGSSYRA ska endast användas för att behandla vårtor på händer och fotsulor.

- Vårtor uppträder främst på händer och fötter
- Har samma färg som huden
- Omkretsen varierar från mindre än en millimeter till mer än en centimeter
- Flera vårtor uppträder vanligtvis samtidigt
- Kontaminering sker ofta genom direktkontakt, men också via handdukar eller infekterade ytor
- Kliande och nagelbitning ökar risken för kontaminering



Använd inte Dr. Yglo VÅRTBORTTAGNINGSSYRA för mjällvårtor

- Åldersvårtor kan ha olika storlek och färg
- Genomsnittlig omkrets är 0,5 till 1 cm
- Börjar ofta som en hudfärgad, gulbrun eller gråbrun fläck. Med tiden blir de större och fetare
- De ser ut som om de ligger på huden och är lätta att skrapa bort, men sitter i själva verket fast ordentligt på huden
- De kan uppstå var som helst på kroppen, med undantag för handflatorna, fotsulorna och läpparna. Förekommer oftast på bröstet, ryggen, ansiktet och halsen



Bruksanvisning (för att förhindra kemiska brännskador):

- Applicering av vuxna
- Använd endast på händer och fötter. Använd inte på andra kroppsdelar
- Smörj in huden runt omkring med vaselin eller zinksalva för att skydda huden
- Placera flaskan på ett stabilt underlag som tål den frätande vätskan
- Dutta endast vårtan en gång när du applicerar produkten
- Dutta vårtan endast en gång i veckan
- Se till att vätskan endast kommer i kontakt med vårtan
- Undvik kontakt med frisk hud
- Låt vätskan torka ordentligt efter appliceringen
- Låt vårtan vara oskyddad
- Resultatet syns efter 1 vecka
- Förvaras utom räckhåll för barn



GÖR INTE SÅ HÄR:

- Ska inte appliceras av personer under 18 år;
- Använd inte på vårtor på andra delar av kroppen än händerna eller fötterna;
- Använd inte på vårtor som helt eller delvis ligger under en nagel;
- Låt inte vätskan komma i kontakt med frisk hud;
- Använd inte produkten om dina händer skakar eller om dina fingrar är stela;
- Dutta inte på vårtan mer än en gång vid applicering;
- Täck inte över vårtan efter att du har applicerat vätskan;
- Använd inte på födelsemärken, vattenvårtor, öppna sår, hyperpigmentering, åldersvårtor, vårtor som är mörkfärgade, håriga eller har ett onormalt utseende;
- Använd inte under graviditet eller amning.
- Upprepa inte behandlingen utan att vänta en vecka.



⚠ VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Använd inte Dr. Yglo VÅRTBORTTAGNINGSSYRA:

- På barn yngre än 4 år
- Om du är överkänslig mot en eller flera av ingredienserna
- I ansiktet (vätskan får aldrig komma i kontakt med ögonen eller slemhinnorna i näsan eller munnen)
- På könsvårtor eller i underlivet
- På födelsemärken, mollusker, öppna sår, leverfläckar, nevus, seborroiska keratoser (åldersvårtor), vårtor som är mörkt pigmenterade, håriga eller har ett ovanligt utseende
- Vid röda, irriterade eller infekterade vårtor
- Omedelbart efter kirurgisk borttagning av vårtor, frysbehandling av vårtor (kryoterapi) eller laserbehandling. Detta gäller särskilt när huden är röd eller smärtsam efter behandlingen. I det här fallet måste du vänta minst fyra veckor tills rodnaden eller inflammationen i huden har försvunnit helt. Först då kan du börja använda Dr. Yglo VÅRTBORTTAGNINGSSYRA igen

- Under graviditeten eller under amningsperioden
- Vid vårtor som helt eller delvis sitter under nageln
- Dutta vårtan högst en gång och upprepa endast vid behov efter en veckas uppehåll
- Undvik kontakt med ögonen. Kontakt med vitögat kan leda till blindhet
- Gnugga inte och rör inte ögonen med händerna om produkten har kommit i kontakt med dem. Om produkten kommer i ögonen, sök omedelbart läkarhjälp

Var särskilt försiktig när du använder Dr. Yglo VÅRTBORTTAGNINGSSYRA:

- Vid tveksamhet kring diagnosen (hudförändringen kan inte entydigt förklaras som en vårta)
 - Vid immunbrist (t.ex. om du tar cytostatika)
 - Vid diabetes eller andra åkommor, såsom kärlsjukdomar, eftersom sår läker sämre
- I dessa fall får du inte använda Dr. Yglo VÅRTBORTTAGNINGSSYRA innan du har rådfrågat en läkare.

⚠ VARNINGAR

- Endast avsedd för extern användning
- Använd med största försiktighet. Vätskan i Dr. Yglo Vårtborttagningssyra är frätande
- Om frisk hud kommer i kontakt med vätskan, skölj den med vatten. Om huden trots dessa försiktighetsåtgärder blir irriterad måste den behandlas på samma sätt som en brännskada
- Kontakta läkare om dina besvär inte avtar
- Förslut flaskan ordentligt efter användning och förvara den i upprätt läge
- Förvaras utom räckhåll för barn
- Användning av barn, äldre och personer med funktionsnedsättning måste ske under uppsikt av en vuxen
- Undvik kontakt med kläder, textil, dukar eller hud
- Sluta använda om blåsor uppstår
- Dutta vårtan högst en gång och upprepa endast vid behov efter en veckas uppehåll

BIVERKNINGAR

Dr. Yglo Vårtborttagningssyra kan orsaka vissa biverkningar, även om inte alla kommer att uppleva dessa biverkningar. De biverkningar som kan uppstå vid användning av Dr. Yglo Vårtborttagningssyra är irriterad hud, brännande känsla, hudrodnad eller överkänslighetsreaktioner. Om någon av dessa biverkningar blir allvarlig, eller om du märker några biverkningar som inte anges i denna bruksanvisning, ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal.

INTERAKTIONER MED LÄKEMEDEL

Inga kända interaktioner med andra läkemedel

INNEHÅLL I DR. YGLO VÅRTBORTTAGNINGSSYRA

En flaska fylld med 2 ml av en blandning av monoklorättiksyra (50 %) och renat vatten. En anpassad applikator används för att administrera formuleringen till vårtan.

FÖRVARING

Förvara Dr. Yglo syrabehandling av vårtor vid en temperatur på 15–25 °C på en torr och mörk plats i originalförpackningen och utom räckhåll för barn.

🕒 Utgångsdatum anges på botten av förpackningen. Öppnad produkt kan användas fram till utgångsdatumet.

För mer information om Dr. Yglo syrabehandling av vårtor kan du besöka www.dryglo.com. För alla produktförfrågningar, kontakta marknadsföraren på asiakaspalvelu@fennogate.fi.

Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med den här produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

FÖRKLARING AV SYMBOLER

Varningsskyltarna och symbolerna på förpackningen och bruksanvisningarna är viktiga för att säkerställa att du använder denna produkt på ett säkert och korrekt sätt och för att skydda dig och andra från skador. Symbolerna förklaras i tabellen nedan:

Symbol	Förklaring
	Symbol för tillverkaren
	Symbol som anger att man ska läsa bruksanvisningen
	Symbol för distributören
	Symbol som anger att försiktighet är nödvändig när du använder produkten
	Symbol för utgångsdatum
	Symbol som anger att föremålet är en medicinteknisk produkt
	Varning: frätande substans
	Ej för barn i åldern 4 år och yngre
	Symbol som anger att produkten ska förvaras utom räckhåll för barn
	Symbol som anger att denna produkt inte bör användas av gravida kvinnor eller under amning
	Symbol för partinummer
	Symbol som anger att produkten ska förvaras vid en temperatur mellan 15 °C och 25 °C
	Symbol som anger den unika enhetsidentifieraren

Så här använder du Dr. Yglo Vårtborttagningssyra

(Endast vuxna får administrera produkten):

Vänligen ansök med största omsorg.

Lösningen är frätande. Var extra försiktig när du applicerar produkten på delar av händerna eller fötterna som är svårare att nå. Detta gäller särskilt personer med nedsatt rörlighet eller vid nedsatt finmotorik (skakande händer, stela fingrar).




1. Dr. Yglo Vårtborttagningssyra har ett barnsäkert lock som kan öppnas på följande sätt: Placera flaskan på ett fast underlag som kan motstå den frätande vätskan. Undvik kontakt med kläder, textil eller dukar. Du öppnar flaskan genom att samtidigt trycka ned korken och vrida den moturs.
2. Vaseline eller fet kräm kan appliceras på den friska huden som omger vårtan för att skydda huden under behandlingen. Ta bort korken från medicinflaskan när du är redo att dosera produkten omedelbart.
3. Ta av locket från flaskan.
4. Applicera en liten mängd Dr. Yglo Vårtborttagningssyra på vårtan med hjälp av applikatoren (se till att vätskan inte droppar). Se till att du endast applicerar Dr. Yglo Vårtborttagningssyra på vårtan och att du inte duttar på vårtan mer än en gång.

5. Låt den torka och täck inte över vårtan. Stäng försiktigt flaskan efter användning. Dr. Yglo Vårtborttagningssyra ska inte appliceras mer än en gång per vecka.

Vätskan måste få en vecka på sig att bryta ner vårtans yttre lager, så resultatet kommer inte att synas omedelbart efter att vätskan har applicerats. Beroende på vårtans storlek och tjocklek kan det bli nödvändigt att upprepa användningen av Dr. Yglo VÅRTBORTTAGNINGSSYRA en vecka efter första behandlingen. Upprepa inte behandlingen tidigare.



ANVÄND ENDAST FÖR VÅRTOR PÅ HÄNDER OCH FÖTTER.

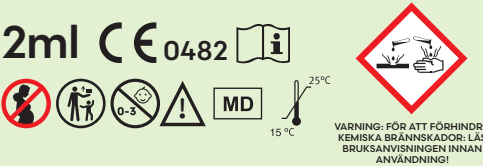

TheOTCLab
Fred. Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam,
The Netherlands

Fennogate Finland Oy.
Microkatu 1, 70210 Kuopio
www.fennogate.fi